

# AkusTone™

## ušní sprej

15 ml

300 dávek

### Návod k použití

**AkusTone** je zdravotnický prostředek obsahující ingredience, které jemně rozpouští zbytkový ušní maz v zevním zvukovodu, umožňující správnou ušní hygienu. Díky svému účinku, AkusTone pomáhá k odstranění mazové zátky, prevenci jejich vzniku a zajišťuje dostatečnou hydrataci kůže, zmírňující podráždění. Navíc AkusTone pokrývá kůži zevního zvukovodu jemným filmem, zabraňujícím zadržování vody v uchu během koupání nebo vodních sportů. Speciální aplikátor umožňuje jednoduchou aplikaci produktu do zvukovodu bez nadměrného tlaku.

#### AkusTone:

- rozpouští zbytkový ušní maz
- předchází utváření mazové zátky
- umožňuje udržování správné ušní hygieny v případě nadměrného ušního mazu u dětí a osob používajících sluchové pomůcky nebo sluchátka
- předchází zadržování vody v uchu během koupání nebo při vodních sportech u osob, které mají tendenci k opakujícím se infekcím zevního ucha

#### Použití a ovládání zdravotnického prostředku:


Vzhledem ke způsobu aplikace je produkt rovnoměrně rozptýlen ve zvukovodu. V důsledku toho není nutné zavádět aplikátor hluboko do ucha. Děti a kojenci starší 3 měsíců:

- 1 vstřík, dospělí: 1-2 vstříky do zevního zvukovodu:
- Pro rozpuštění mazové zátky: použijte 3 - 5krát denně, dokud se zbytkový ušní maz nerozpustí.

- Profylaktický efekt a správná ušní hygiena: používejte 1-2 krát týdně k prevenci utváření mazové zátky, používejte těsně před koupelí pro prevenci zadržování vody v uchu.

U dětí a kojenců by měl být produkt aplikován s opatrností dospělou osobou.

Nezavádějte aplikátor příliš hluboko do ucha, aby nedošlo k poškození sluchového orgánu. Není nutné zvukovod po aplikaci produktu dodatečně vyplachovat. Před prvním použitím několikrát jemně stiskněte rozprašovací pumpičku, aby se tímto způsobem naplnila a bylo zajištěno správné vstříkávání produktu. Omývejte špičku aplikátoru pod tekoucí vodou a po použití jemně osušte. V případě potíží s aplikací sejměte špičku aplikátoru a nasadte ji zpět na rozprašovač.

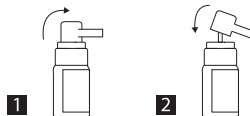

#### Složení:

Olivový olej, mandlový olej, jojobový olej, tekutý parafin, vitamin E, polysorbát 80.

Bez vody nebo konzervačních látek.

### Zvláštní varování a doporučená preventivní opatření:

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na jakoukoli složku produktu. Nepoužívejte v případě onemocnění sluchového orgánu, prasknutého bubínku nebo pokud je v uchu cizí těleso. Neaplikujte do očí, nosu nebo ústní dutiny. Použití zdravotnického prostředku u kojenců a dětí do 1 roku věku by mělo být konzultováno s lékařem. V případě rozpuštění mazové zátky vyhledejte radu lékaře, pokud se problémy se sluchem nebo jiné symptomy nezlepší po 5 dnech používání. Používání produktu pouze jednou osobou je doporučeno z hygienických důvodů.

### Místo a podmínky skladování:

Skladujte v originálním obalu z dosahu dětí. Pozornost by měla být věnována zachování vhodných skladovacích podmínek produktu. Nepoužívejte produkt po datu spotřeby.



Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.  
ul. Partyzancka 133/151  
95-200 Pabianice  
Polsko

### Distributor:

Aflofarm Czech Republic s.r.o.  
Vinohradská 33/89  
120 00 Praha – Vinohrady  
Česká republika

**Datum vydání instrukcí:** 12/2017



### Označení balení:



číslo šarže



datum expirace



přečtěte si návod k použití



limitovaná povolená teplota pro uchovávání



výrobce